



ResMed

AirCurve™ 10 VAUTO

S

ST



Botón para regresar a la pantalla Inicio en cualquier momento

Botón de Iniciar/Detener para iniciar el tratamiento

Botón para ver y seleccionar opciones

Salida de aire para conectar el tubo de aire

Cubeta de agua para humidificar

Guía de uso rápida
Español

Rx Only

Lea toda la guía de usuario del AirCurve™ 10 antes de usar.

Instalación



1 Coloque el dispositivo en una superficie plana estable.



2 Enchufe el conector de alimentación en la parte trasera del dispositivo. Conecte un extremo del cable de alimentación en la fuente de alimentación y el otro extremo en la toma de corriente.




3 Conecte el tubo de aire firmemente a la salida de aire ubicada en la parte trasera del dispositivo.



4 Abra la cubeta de agua y llénela con agua hasta que alcance la marca de nivel máximo.



5 Cierre la cubeta de agua e insértela en el costado del dispositivo.

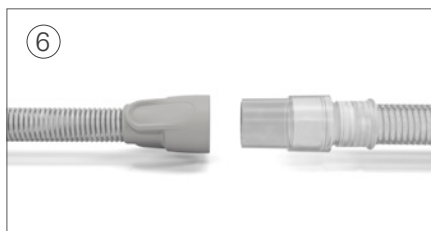

6 Conecte el extremo libre del tubo de aire firmemente al sistema de mascarilla ensamblado. Presione Iniciar/Detener para iniciar el tratamiento.

Adaptación al tratamiento


Si es la primera vez que lo usa, es posible que necesite un tiempo para acostumbrarse al tratamiento. Esto es normal, ya que la mayoría de los pacientes tardan de una a dos semanas en acostumbrarse a la presión del aire.

Cómo superar los síntomas cambiando los parámetros de comodidad


Si tiene dificultad para acostumbrarse al tratamiento, use las funciones de comodidad del AirCurve 10 para ayudarse a conseguir dormir mejor.

- **Sequedad o goteo nasal**—Si se le seca o le gotea la nariz, ajuste el Nivel Humedad girando el botón hacia arriba.
- **Gotitas de agua (condensación)**—Si se forman gotitas de agua sobre la nariz, en la mascarilla o el tubo de aire, ajuste el Nivel Humedad girando el botón hacia abajo.


Para cambiar la función Nivel Humedad:

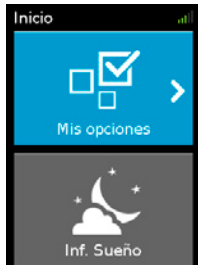


1. Presione el botón para ingresar a Mis opciones.

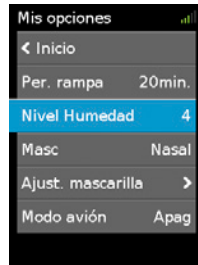

2. Gire el botón para resaltar Nivel Humedad y luego presiónelo para seleccionarlo.

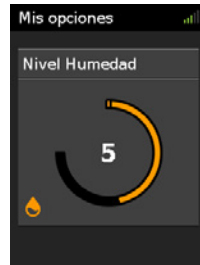


3. Gire el botón para ajustarlo a su parámetro preferido.

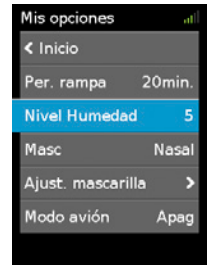

4. Presione el botón para guardar el cambio.

- **Dificultad para dormirse**—Si tiene dificultad para dormirse con la presión alta, encienda la función Per. rampa. o aumente Per. rampa.
- **Sensación de distensión**—Si se siente ligeramente hinchado (distensión gástrica) por tragar aire, encienda la función Per. rampa. o aumente Per. rampa.
- **Siente que no recibe suficiente aire**—Si siente que no está recibiendo suficiente aire, apague la función Per. rampa.


Para cambiar la función Per. rampa:

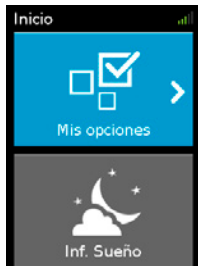

1. Presione el botón para ingresar a Mis opciones.



2. Gire el botón para resaltar Per. rampa y luego presiónelo para seleccionarlo.

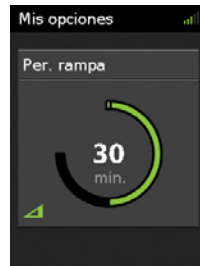

3. Gire el botón para ajustarlo a su parámetro preferido.



4. Presione el botón para guardar el cambio.



ResMed

Limpieza

1. Lave la cubeta de agua y el tubo de aire en agua tibia con un detergente suave. No los lave en lavadoras de ropa o de platos.
2. Enjuague bien la cubeta de agua y el tubo de aire y déjelos secar fuera de la luz solar directa o el calor.
3. Limpie el exterior del dispositivo con un paño seco.

Consulte la guía de usuario de la mascarilla para obtener instrucciones detalladas sobre cómo limpiar la mascarilla.

Examine y reemplace las piezas con regularidad

Por su comodidad y su salud, es importante que examine y reemplace las piezas y los suministros con regularidad. Reemplazar las piezas y suministros con regularidad contribuirá a que reciba un tratamiento óptimo y con comodidad continua.

Consulte la guía de usuario del AirCurve 10 para obtener instrucciones detalladas sobre cómo examinar el dispositivo. Póngase en contacto con su proveedor de atención para obtener información sobre cuándo programar los reemplazos.

Guía para programar los reemplazos:

Todos los meses	Cada 3 meses	Cada 6 meses
Almohadilla de la mascarilla	Marco de la mascarilla (excluye el arnés)	Arnés
Filtros de aire	Tubo de aire	Cubeta de agua

Número de serie	Número del dispositivo
Tipo y tamaño de mascarilla	Fecha de instalación
Notas	



ResMed Ltd

1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Australia

Para obtener información acerca de otras sucursales de ResMed en todo el mundo, consulte el sitio web www.resmed.com. Para obtener información para el paciente, consulte el sitio web www.resmed.com/ip. AirCurve es una marca registrada de ResMed Ltd.

© 2017 ResMed Ltd. 378316/2 2017-09

ResMed.com



378316