



ResMed

AirSense™ 10 AUTOSET

AUTOSET FOR HER

ELITE

CPAP



Botão Início para voltar à tela inicial a qualquer momento

Botão Iniciar/Parar para iniciar a terapia

Botão giratório para navegar e alterar as opções

Saída de ar para conectar a tubulação de ar

Câmara de água para umidificação

Guia de início rápido
Português

Rx Only

Leia todo o Manual do usuário do AirSense™ 10 antes da utilização.

Instalação



Coloque o dispositivo em uma superfície plana estável.



Conecte o conector de energia na parte posterior do dispositivo. Conecte uma extremidade do cabo de alimentação à unidade de alimentação e a outra extremidade à tomada de energia.




Conecte a tubulação de ar firmemente à saída de ar localizada na parte posterior do dispositivo.



Abra a câmara de água e encha-a até a marca de nível máximo de água.



Feche a câmara de água e insira-a na lateral do dispositivo.

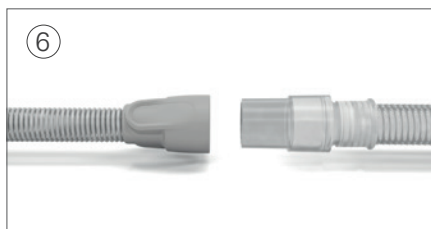

Conecte firmemente a extremidade livre da tubulação de ar à máscara montada. Pressione o botão Iniciar/Parar para iniciar a terapia.

Adaptação à terapia


Se for um novo usuário, você poderá precisar de algum tempo para se acostumar com a terapia. Isso não é incomum; a maioria dos pacientes leva de uma a duas semanas para se adaptar à pressão do ar.

Superar os sintomas por meio da alteração das configurações de conforto

Se você tiver dificuldade para se acostumar com a terapia, use os recursos de AirSense 10 conforto para ajudá-lo em sua jornada para obter um sono melhor.

- **Nariz seco ou coriza** — Se ficar com o nariz seco ou com coriza, aumente a Umidade.
- **Gotículas de água (condensação)** — Se ficar com gotículas de água no nariz, na máscara ou na tubulação de ar, reduza a Umidade.

Para alterar a Umidade:

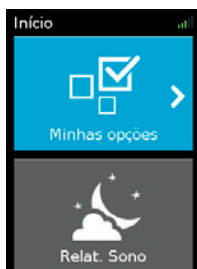


1. Pressione o botão giratório para inserir Minhas opções.



2. Gire o botão giratório para iluminar Umidade e pressione-o para selecionar essa opção.




3. Gire o botão giratório para ajustar sua configuração preferida.

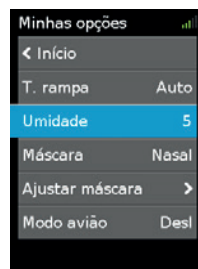


4. Pressione o botão giratório para salvar a alteração.

- **Dificuldade para dormir** — Se estiver com dificuldade para dormir com a pressão alta, ligue a Rampa automática ou aumente o Tempo de rampa.
- **Sensação de inchaço** — Se estiver com uma leve sensação de inchaço por engolir ar, ligue a Rampa automática ou aumente o Tempo de rampa.
- **Sensação de não ter ar suficiente** — Se sentir que não está recebendo ar suficiente, desligue o Tempo de rampa.

Para alterar o Tempo de rampa:

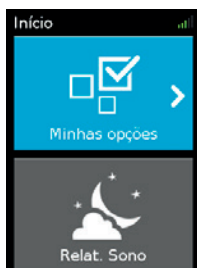

1. Pressione o botão giratório para inserir Minhas opções.

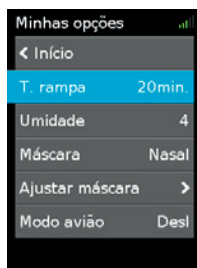

2. Gire o botão giratório para iluminar Tempo de rampa e pressione-o para selecionar essa opção.



3. Gire o botão giratório para ajustar sua configuração preferida.



4. Pressione o botão giratório para salvar a alteração.



ResMed

Limpeza

1. Lave a câmara de água e a tubulação de ar em água morna e detergente suave. Não lave em máquinas de lavar roupas ou máquinas de lavar louça.
2. Enxague a câmara de água e a tubulação de ar completamente e deixe secar fora da luz direta do sol e/ou longe de calor.
3. Limpe o exterior do dispositivo com um pano seco.

Consulte o Manual do usuário da máscara para obter instruções detalhadas sobre a limpeza da máscara.

Verificar e trocar peças regularmente

É importante para seu conforto e saúde que você verifique e troque as peças e os suprimentos regularmente. Trocar peças e suprimentos regularmente ajuda a garantir que você receba a terapia ideal e um conforto contínuo.

Consulte o Manual do usuário do AirSense 10 para obter instruções detalhadas sobre a verificação do dispositivo. Contate o seu prestador de cuidados de saúde para obter informações sobre a programação de reposição.

Guia de programação de reposição:

Todo mês	A cada 3 meses	A cada 6 meses
Acolchoado ou almofada da máscara	Armação da máscara (não inclui capacete)	Capacete
Filtros de ar	Tubulação de ar	Câmara de água

Número de série	Número do dispositivo
Tipo e tamanho da máscara	Data da instalação
Observações	



ResMed Ltd

1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Austrália

Consulte www.resmed.com para conhecer outras localizações da ResMed a nível mundial. Para obter informações sobre patentes, consulte www.resmed.com/ip.

AirSense é uma marca comercial da ResMed Ltd. © 2017 ResMed Ltd. 378313/2 2017-09

ResMed.com



378313